

**Tabla n° 1**  
**Desinfección de impresiones (\*)**

Material de Impresión	Solución desinfectante/ Tiempo de exposición		
	Hipoclorito (1%)	Iodóforos	Glutaraldehído (2%)
Alginato	R / 1 min.	R / 1 min.	NR
Silicona o Mecaptano	R / 10 min.	R / 10 min.	R / 10 min.
Polisulfuro de caucho	R		
Pasta Zinquelónica	NR	NR	R / 30 min.
Modelina	NR	NR	R / 30 min.

(\*) Siempre enjuagar previamente con agua.

R Recomendable

NR No recomendable

**Tabla N° 2**  
**Desinfección de aparatología para laboratorio odontológico (\*)**

Aparato Prótesis/ Ortodoncia	Desinfectante		
	Hipoclorito (1%)	Iodóforos	Glutaraldehído (2%)
<b>Prótesis Fijas</b>			
Metal / Porcelana	R / D	R / D	R
Metal / Acrílico	R / D	R / D	R
Porcelana	R / D	R / D	R
Acrílico	R	R	NR
<b>Prótesis Removible</b>			
Metal / Acrílico	R / D	R / D	NR
Acrílico / Porcelana	R / D	R / D	NR
Acrílico	R	R	NR
<b>Ortodoncia</b>			
Acrílico / Alambres	R / D	R / D	NR
<b>Férulas de Relajamiento</b>			
Acrílico	R	R	NR
Modelos de Yeso	Rociado o Inmersión	R	
Rodetes de Mordida		R	Rociado
Registros de Mordida	Rociado o Inmersión	R	

R Recomendable

NR No recomendable

R/D Recomendable pero puede dañar el material.